



زایمان به روش سزارین، خصوصاً در موارد اورژانسی، می‌تواند چالش‌هایی را به دنبال داشته باشد. در این میان یکی از پر خطرترین چالش‌های پیش‌رو آسیب‌زدن به اندام جنین در حین برش رحم می‌باشد. بهترین و امن‌ترین راه‌حل برای جلوگیری از این خطر استفاده از C-SAFE برای برش رحم در سزارین می‌باشد.

C-SAFE بهترین راه‌حل برای تمام جراحان برتر دنیا در حین سزارین می‌باشد.

- + ریسک ایجاد پارگی و زخم در جنین به صفر می‌رسد.
- + بالاترین میزان امنیت در حین کار با این وسیله وجود دارد.
- + بهترین برش با کمترین میزان آسیب به رحم در سریع‌ترین زمان اتفاق می‌افتد.
- + بهترین طراحی برای تسلط کافی جراح در حین برش رحمی در عمل سزارین



سوالات متداول

سوال ۱: چرا باید از C-Safe استفاده کنیم؟

پاسخ: C-Safe نه تنها از ایجاد زخم‌های زایمانی در جنین در حین برش رحمی در عمل سزارین جلوگیری می‌کند، بلکه از بروز عوارض بعدی حقوقی و عاطفی که در اثر آسیب‌های جنینی در حین سزارین است نیز جلوگیری به عمل می‌آورد و بدین ترتیب نقش مهمی را در مناسبات اجتماعی ایفا می‌کند.

C-Safe از سال ۲۰۱۲ به سرعت جایگاه خود را بین جراحان دنیا باز کرده است و بیش از هزاران سزارین موفق با این وسیله در سراسر دنیا انجام شده است. این وسیله هم اکنون مورد توجه بسیاری از انجمن‌های مخالف آسیب‌های جنینی حین سزارین می‌باشد.

سوال ۲: با وجود دستکش‌های جراحی لغزنده، چگونه می‌توان بدون لغزش C-Safe در دست با آن کار کرد؟

پاسخ: دسته‌ی C-Safe با طراحی ارگونومیک و مفرس به طور کامل با دستکش‌های جراحی تطابق دارد. وجود شیارهای موجود در دو طرف دسته‌ی C-Safe، باعث می‌شود این وسیله کاملاً محکم در دست جراح به طور ثابت در طول سزارین ثابت بماند.

سوال ۳: سایز تیغ‌های C-Safe چند می‌باشد؟

پاسخ: C-Safe شامل یک تیغ‌های جراحی استنلس استیل سایز #۲۳ می‌باشد که توسط دسته‌ای با طراحی ارگونومیک از جنس رزین مدیکال گرید احاطه شده است.

سوال ۴: آیا می‌شود از C-Safe بیش از یک بار استفاده نمود؟

پاسخ: به هیچ عنوان نمی‌توان از C-Safe بیش از یکبار در عمل‌های سزارین استفاده نمود.

محصولات مرتبط



Actim® PROM

کیت تشخیص پارگی زودرس کسبه آب



MityOne®

وکيوم نوزاد MityOne



Mobius®

رتراكتور شکمی مخصوص سزارین (موبیوس)



چگونه از C-Safe استفاده کنیم؟

زمان آن رسیده است که از آسیب به جنین در حین سزارین به طور کامل جلوگیری شود.

اسکالپل C-Safe را به طور مورب داخل رحم برده و سپس دسته‌ی آن را به صورت افقی در دستان خود نگهدارید.




02
بلافاصله دسته‌ی C-Safe را محکم در حالت افقی نگه دارید و به دور از هرگونه آسیب به نوزاد برش را آغاز نمایید.




01
برای ورود به صورت بلانت بدون هیچ‌گونه آسیبی به نوزاد با زاویه‌ی مورب وارد سگمنت تحتانی رحم شوید.



03. زمانی که در داخل کواوتی رحمی وارد شدید برش را در طول مسیر عرضی ادامه دهید.

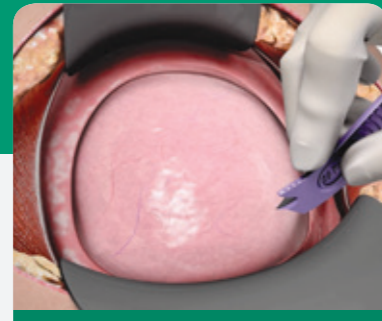

02. بلافاصله پس از ورود C-Safe به دیواره‌ی رحم، دسته را محکم در حالت افقی نگه دارید، بدین ترتیب نوک C-Safe کمی رو به بالا به سمت دیواره‌ی داخلی رحم در مسیر درست برش قرار می‌گیرد.

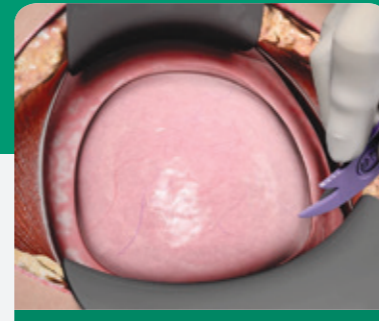

01. از نوک انتهایی (دیستال) محافظ تیغه برای ورود به دیواره‌ی رحم استفاده کنید. برای ورود به دیواره‌ی رحم زاویه‌ی ورود نوک C-Safe را با توجه به ضخامت دیواره تنظیم کنید.

نکات مهم

+ با توجه به ضخامت دیواره‌ی رحم برای ورود به کواوتی رحم ممکن است نیاز به ایجاد یک یا چند راه توسط نوک انتهایی C-Safe در شروع برش داشته باشیم.

+ بالا نگه داشتن نوک C-Safe در هنگام برش و ایجاد زاویه‌ی مناسب برش ریسک آسیب به اجزای زیرین مانند پرده‌ی آمنیوتیک یا طناب نافی را به صفر می‌رساند.

+ نوک انتهایی (دیستال) محافظ تیغه در C-Safe این اطمینان را به جراح می‌دهد تا به صورت بلانت وارد پایین‌ترین سگمنت رحم در زمان شروع برش، در عمل سزارین شود.

+ تیغهی محافظت شده که دور از سر جنین برش را در رحم ایجاد می‌کند و بنابراین از هرگونه شکاف و برش در سر و اندام جنین جلوگیری می‌شود.

+ طراحی ارگونومیک و مفرس دسته‌ی C-Safe این اطمینان را به جراح می‌دهد تا تحت هر شرایطی در حین عمل جراحی این وسیله را به طور محکم در دستان خود حفظ کرده و تسلط کافی داشته باشد.


تیغهی محافظت شده توسط نوک دیستال که در بالا به آن اشاره شد.



نوک انتهایی (دیستال) محافظ تیغه که در بالا به آن اشاره شد. دسته‌ی ارگونومیک و مفرس که در بالا به آن اشاره شد.


C-Safe ریسک ایجاد پارگی و آسیب به جنین را که در استفاده از اسکالپل‌های سنتی حین عمل سزارین ممکن است به وجود بیاید به صفر رسانده و بالاترین میزان امنیت را برای مادر، جنین و جراح به وجود می‌آورد.

اسکالپل جراحی سنتی

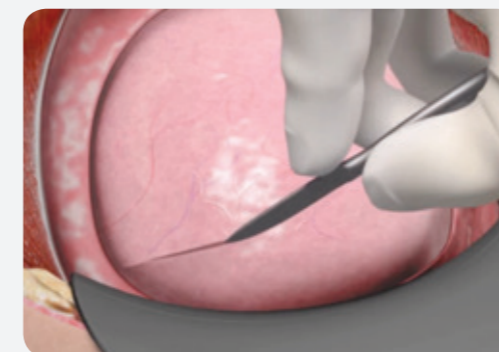

نوزاد در معرض خط زخم حین عمل سزارین می‌باشد.

اسکالپل جراحی ایمن C-Safe

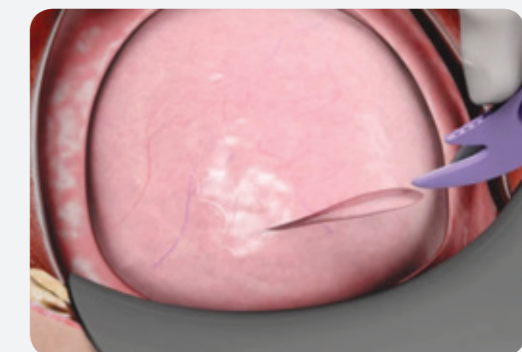

به گونه‌ای طراحی شده است که در حین عمل سزارین حفاظتی برای نوزاد می‌باشد.