



Pipelle®

ENDOMETRIAL SUCTION CURETTE

Simple technique, Proven clinical performance and reliability.

Created by a gynecologist, the Pipelle® features an insightful design that affords a consistency of sample collection that can be relied upon time after time.

With a rapid, simple technique, the procedure takes less than a minute to perform and produces little - if any - postprocedure bleeding or patient discomfort. Completely self contained, the Pipelle requires no additional equipment to complete the procedure.


Excellent patient acceptance; The Pipelle is readily inserted in most cases without the need for dilation. Flexibility of the curette has been optimized to facilitate adaptation to normal uterine curvature, thus promoting contact with the wall for improved sample collection.



شرکت تسنیم بهبود آرمان
نماینده انحصاری محصولات کوپر سرجیکال آمریکا در ایران


Pipelle® یک انتخاب خوب و مقرون به صرفه است برای بیماری که به دلایل زیر نیاز به بیوپسی از اندومتر دارند:

- تشخیص کارسینوم و تغییرات پره کانسر
- بررسی منورژی و متورژی
- بررسی درمان‌های هورمونی
- تشخیص تاریخ سیکل اندومتر
- تشخیص علل نازایی و عفونت‌ها

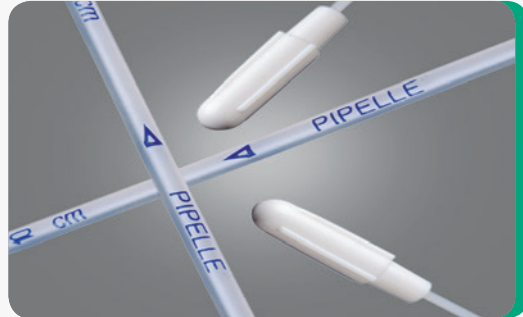

روش نمونه‌گیری

ابتدا بیمار را در وضعیت مناسب قرار داده، پایپل را داخل حفره رحم کرده و بوسیله کشیدن پیستون داخلی، ایجاد فشار منفی نموده، سپس با چرخش چندین باره‌ی پایپل به مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه در فاصله فوندوس تا دهانه رحم، بیشترین مقدار مناسب از سطح بافت، جمع‌آوری خواهد شد. در انتها پایپل را (حداکثر ۱ میلی‌متر) بریده و نمونه جمع‌آوری شده را داخل ویال‌های حاوی فرمالین جهت انتقال به آزمایشگاه می‌ریزیم.

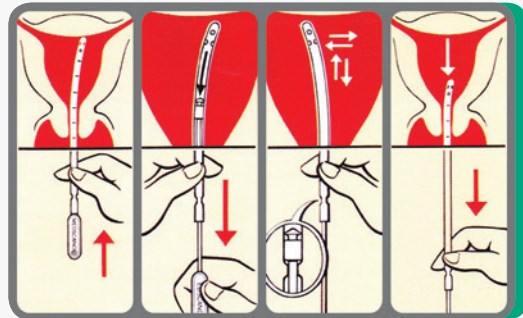


نکات ایمنی

از پایپل نباید در دوران بارداری استفاده شود. پایپل یک بار مصرف بوده و پس از هر بار استفاده باید به دور انداخته شود.

مشخصات سفارش:

- شماره کاتالوگ: ۸۲۰۰
- بسته‌بندی: هر بسته شامل ۲۵ عدد پایپل استریل می‌باشد.

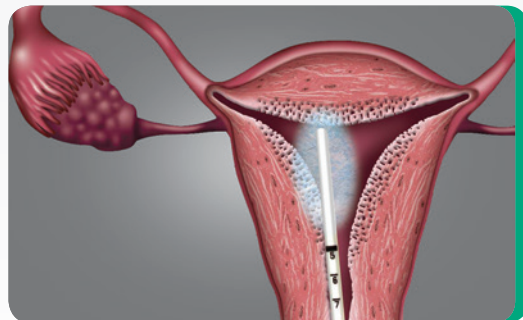

دارای تأییدیه FDA آمریکا

پایپل از سال ۲۰۱۱ توسط شرکت Cooper Surgical آمریکا تولید و توزیع می‌گردد.

